

Anwendungshinweise Antigen Schnelltests bei Laienanwendern

Erweitere Anwendungshinweise zum Einsatz des Speichel-Tests

- Bitte achten Sie darauf, den Test bei Zimmertemperatur zu lagern und anzuwenden.
- Den Test am besten morgens gleich nach dem Aufstehen durchführen.
- Vor der Probeentnahme husten oder stark räuspern, um infektiösen Speichel im Mundraum zu sammeln.
- Kein vorheriger Einsatz von aminfluoridhaltiger Zahnpasta (Elmex und Colgate Junior).
- Keine Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme vor der Testung (mind. 60 Minuten).
- Keine Substanzen wie Pfefferminz, Menthol, Ibuprofen, Antibiotika, Hustensaft oder Asthmaspray einsetzen, da diese das Ergebnis stark verfälschen können. Den gleichen Effekt haben Haribos, die Kindern oftmals gegeben werden, um den Speichelfluss anzuregen.
- Zudem ist es wichtig, nicht an dem Teststäbchen zu saugen, sonst kann der bereits aufgesaugte Speichel wieder aus dem Schwamm gesogen werden.
- Raucher müssen mit eingeschränkten und ungültigen Testergebnissen rechnen, da es durch den hohen Schadstoffgehalt in der Mundflora, ebenfalls zu falschen Reaktionen mit der Trägerflüssigkeit kommen kann.